

ThinPrep® 婦人科細胞診 細胞採取方法


ブルーム型ブラシプロトコル



Point

細胞採取を行う前に

- 血液や過剰な粘液・滲出液を、ガーゼや綿棒などであらかじめ除去してください。
- 従来法と同様に、月経時の細胞採取は出来る限り避けることをお勧めします。

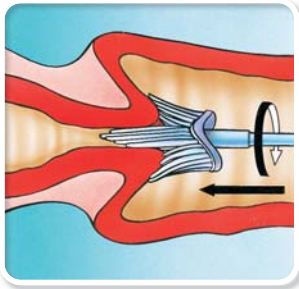

採取する

ブルーム型ブラシで、子宮頸部から十分に細胞を採取します。子宮頸管内にブラシの中央部を挿入します。周りの短いブラシ部分が、子宮腔部に接するところまで挿入してください。ブラシをそっと押し付け、**右に5回転させて下さい**。採取後は、すぐにThinPrep® バイアルに入れて下さい。

注意! 採取器具を強く患部におしつけると出血する場合がありますので、ご注意ください。



すすぐ

ブラシをバイアル内のプレザーブサイト液に浸し、**容器の底で毛先が広がるように素早く10回押し付けて下さい**。バイアル内で最後に強くかき回し、ブラシを廃棄します。

注意! **ブルーム型ブラシの先端部分（白い部分）はバイアル内に落とさないで下さい。**



蓋を閉める

蓋の黒いラインがバイアルの黒いラインを超えるように、バイアルの蓋をしっかりと閉めます。

注意

- 採取器具の再利用はしないでください。
- Rovers® サーベックスブラシを妊娠10週目以降の女性に対して使用することは禁止されています。多くのブルーム型ブラシでは妊娠女性に対しての使用が禁止されていますので、必ず採取器具の添付文書をご確認ください。



ThinPrep® プレザーブサイト液20ml