

ThinPrep® 婦人科細胞診 細胞採取方法


スパーテル／子宮頸管ブラシプロトコル



Point

細胞採取を行う前に

- 血液や過剰な粘液・滲出液を、ガーゼや綿棒などであらかじめ除去してください。
- 従来法と同様に、月経時の細胞採取は出来る限り避けることをお勧めします。

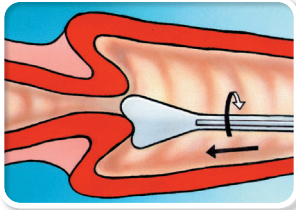


採取する

プラスチック製のスパーテルを子宮腔部に接するところまで挿入し、1回転させて十分に細胞を採取します。


採取後はすぐにThinPrep® バイアルに入れて下さい。

注意! 採取器具を強く患部におしつけると出血する場合がありますので、ご注意ください。

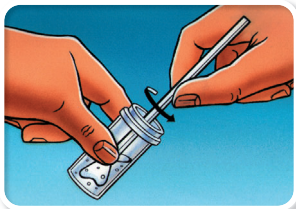

すすぐ

バイアル内で素早く10回強にかき回したら、スパーテルを廃棄してください。

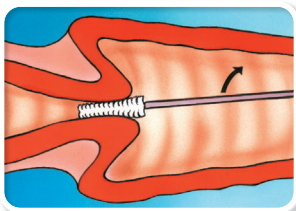


採取する

子宮頸管ブラシで頸管内から十分に細胞を採取します。


ブラシの根元部分が表に出ている状態になるところまで、ブラシを子宮頸管に挿入してください。一方向に、ゆっくりと4分の1または2分の1回転させてます。

注意! ブラシを回転させすぎると出血する場合がありますのでご注意ください。

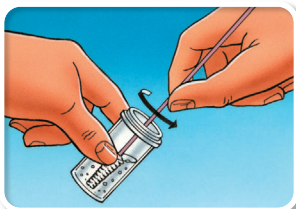

すすぐ

ブラシを先ほど使ったThinPrep® バイアルに入れ、バイアル内壁に押し当てながら素早く10回転させます。バイアル内で最後に強にかき回し、ブラシを廃棄します。

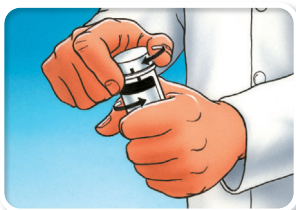

蓋を閉める

蓋の黒いラインがバイアルの黒いラインを超えるように、バイアルの蓋をしっかりと閉めます。

注意

- 採取器具の再利用はしないでください。
- 多くの採取器具は妊娠女性に対しての使用が制限されているため、必ず採取器具の添付文書をご確認ください。

製造販売元： **ホロジックジャパン株式会社**

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-25 日教販ビル
TEL.03-5804-2340 (代) FAX.03-5804-2321

Hologic, ThinPrep は Hologic, Inc. およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Rovers は、Rovers Medical Devices B.V. の登録商標です。
©2017 Hologic, Inc. All rights reserved.

HOLOGIC®
The Science of Sure