


ThinPrep<sup>®</sup> Pap Test<sup>™</sup> 使用法ガイド

## スパーテル／子宮頸管ブラシプロトコル



## 細胞採取を行う前に

- 血液や過剰な粘液・滲出液を、ガーゼや綿棒などであらかじめ除去してください。
- 従来法と同様に、月経時の細胞採取は出来る限り避けることをお勧めします。

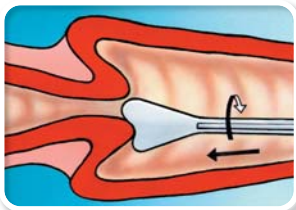

## 採取する


プラスチック製のスパーテルで、子宮腔部から十分に細胞を採取します。

**注意!** 採取器具を強く患部におしつけると出血する場合がありますので、ご注意ください。



## すすぐ

スパーテルをPreservCyt<sup>®</sup>液バイアルに入れます。バイアル内で素早く10回強くかき回したら、スパーテルを廃棄してください。

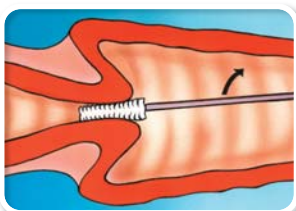

## 採取する

子宮頸管ブラシで頸管内から十分に細胞を採取します。


ブラシの根元部分が表に出ている状態になるところまで、ブラシを子宮頸管に挿入してください。一方向に、ゆっくりと4分の1または2分の1回転させてます。

**注意!** ブラシを回転させすぎると出血する場合がありますのでご注意ください。



## すすぐ

ブラシを先ほど使ったPreservCyt<sup>®</sup>液バイアルに入れ、バイアル内壁に押し当てながら素早く10回転させます。バイアル内で最後に強くかき回し、ブラシを廃棄します。

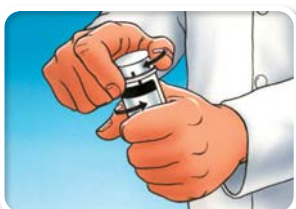

## 蓋を閉める

蓋の黒いラインがバイアルの黒いラインを超えるように、バイアルの蓋をしっかりと閉めます。



## 記録する

バイアルに、患者の氏名およびID番号などを記入します。