


ThinPrep<sup>®</sup> Pap Test<sup>™</sup> 使用法ガイド

## ブルーム型ブラシプロトコル



## 細胞採取を行う前に

- 血液や過剰な粘液・滲出液を、ガーゼや綿棒などであらかじめ除去してください。
- 従来法と同様に、月経時の細胞採取は出来る限り避けることをお勧めします。

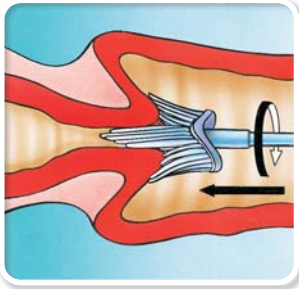

## 採取する

ブルーム型ブラシで、子宮頸部から十分に細胞を採取します。子宮頸管内にブラシの中央部を挿入します。周りの短いブラシ部分が、子宮腔部に接するところまで挿入してください。ブラシをそっと押し付け、右に5回転させて下さい。採取後は、すぐに PreservCyt<sup>®</sup>液バイアルに入れて下さい。

**注意!** 採取器具を強く患部におしつけると出血する場合がありますので、ご注意ください。



## すすぐ

ブラシをPreservCyt<sup>®</sup>液バイアルに入れて、容器の底で毛先が広がるように素早く10回押し付けて下さい。バイアル内で最後に強くかき回し、ブラシを廃棄します。

**注意!** ブルーム型ブラシの先端部分（白い部分）はバイアル内に落とさないで下さい。アルコール成分により頸管粘液などが凝固しブラシ部分からの細胞の分離回収が不十分になる可能性があります。



## 蓋を閉める

蓋の黒いラインがバイアルの黒いラインを超えるように、バイアルの蓋をしっかり閉めます。



## 記録する

バイアルに、患者の氏名およびID番号などを記入します。